

## **AIR BARRIER** pentru coroane si punti din Rasina Compozita

Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de folosire!

Acest produs este o bariera de aer pentru rasina compozita, care reactionand cu aceasta formeaza o pelicula, creand o bariera impotriva oxigenului din aer. In acest fel se elimina aparitia stratului de suprafata lipicios, insuficient fotopolimerizat. Produsul are o consistenta usor vascoasa si poate fi aplicat fin pe suprafata.

**Compozitie:** Polyvinyl alcool, Apa, Etanol.

### **Indicatii de folosire:**

Pentru a reduce suprafata insuficient polimerizata a rasinei de compozit, datorata oxigenului din aer.

**Continut:** 7ml.

### **Instructiuni de folosire:**

In stadiul de polimerizare finala aplicati acest produs in strat fin cu o pensula si uscati-l. Dupa fotopolimerizare, indepartati-l cu o freza sau spalati lucrarea cu apa. Aplicati stratul cat de subtire posibil. Uscarea va dura mai mult, daca produsul va fi aplicat in strat gros.

### **Masuri de precautie:**

1. Este necesara aerisirea incaperii cand folositi acest produs.
2. Dupa utilizare inchideti bine flaconul. Lasat descoperit, prin volatilizare creste vascozitatea si materialul se poate intari.
3. Depozitarea intr-un loc racoros pe o perioada lunga de timp, poate duce la o vascozitate mai mare a produsului. In aceasta situatie, va rugam sa introduceti flaconul in apa fierbinte, astfel produsul isi va reveni la vascozitatea initiala.
4. Dupa aplicarea produsului, spalati pensula cu apa, nu folositi alcool, astfel prevenind intarirea pensulei.
5. Acest produs este inflamabil, nu il folositi si nu il lasati langa foc deschis.
6. Nu atingeti acest produs in mod direct. Evitati contactul direct cu pielea si ochii. Va pot aparea iritatii ale pielii. Daca produsul intra in contact cu pielea sau cu ochii spalati-va imediat cu apa din abundenta si cereti ajutor medical.

### **Depozitare:**

Evitati contactul direct cu razele soarelui si depozitati-l la temperatura camerei. Nu il depozitati in cantitati mari. Echipati-va cu extingtor.

Distribuitor : S.C. FANTASTIC GLASS S.R.L, BUCURESTI, STR. TEPES VODA NR.12, SECT2.

[office@tehnicianulmeu.ro](mailto:office@tehnicianulmeu.ro), <tel:0720.439.058>

Producator: YAMAKIN.Co LTD, Importator unic: FANTASTIC GLASS SRL