

## **RESIN SPACER** pentru coroane si punti din Rasina Compozita

Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de folosire!

Acest produs este o Rasina Spacer, care ne fereste de mirosul neplacut al cauciucului natural. Este suficient de elaborat incat sa satisfaca toate tehnologiile. Aplicand acest produs pe suprafata gipsului, se formeaza un strat pentru ciment si fixeaza rasina compozita pe modelul de gips in timpul modelarii si fotopolimerizarii.

**Compozitie:** cauciuc natural

**Continut:** 5ml.

### **Indicatii de folosire:**

Pentru a forma un spatiu suficient materialului de cimentare, in cazul coroanelor Jacket si pentru a fixa materialul compozit pe model in timpul modelarii si al procesului de fotopolimerizare.

### **Instructiuni de folosire:**

Pentru a realiza o coroana, fateta sau inlay pe modelul de gips aplicati produsul pe suprafata de lucru, evitand marginile. Uscati, apoi, in mod natural sau cu jet de aer fin. Dupa uscare, aplicati pe marginile preparatiilor Resin Separator. Grosimea spatiului creat este de aprox. 20-50 microni.

### **Masuri de precautie:**

1. Este necesara aerisirea incaperii cand folositi acest produs.
2. Dupa utilizare inchideti bine flaconul. Lasat descoperit, prin volatilizare creste viscozitatea si materialul se poate intari.
3. Contactul cu cauciucul natural poate cauza alergii, cum ar fii: iritatie ale pielii, inflamatie, stari febrile, probleme de respiratie, simptom asmatic, tensiune scazuta, stari de soc. Daca aveti aceste simptome, opriti-va din utilizarea acestui produs si cereti ajutor medical.
4. Evitati contactul direct cu acest produs si folositi manusi de plastic sau de cauciuc. Pentru a va proteja impotriva simptomelor enumerate mai sus, nu atingeti acest produs in mod direct. . Daca acest produs intra in contact cu pielea, indepartati-l cu alcool si spalati zona cu apa din abundenta. Daca produsul intra in contact cu zona ochilor, clatiti cu apa si cereti ajutor medical.

### **Depozitare:**

Evitati contactul direct cu razele soarelui si depozitati-l la o temperatura de 4-25 grade Celsius.

Distribuitor : S.C. FANTASTIC GLASS S.R.L, BUCURESTI, STR. TEPES VODA NR.12, SECT2.

[office@tehnicianulmeu.ro](mailto:office@tehnicianulmeu.ro), <tel:0720.439.058>

Producator: YAMAKIN Co. LTD, Importator unic: FANTASTIC GLASS SRL