

## **RESIN SEPARATOR** pentru coroane si punti din Rasina Compozita

Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de folosire!

Acesta este un material izolator care separa rasina compozita de modelul de gips. Aceasta inseamna ca aplicand produsul pe suprafata de gips, rasina fotopolimerizabila se indeparteaza foarte usor.

**Compozitie:** Saruri de acizi grasi, Etanol, Glicerina

### **Indicatii de folosire:**

Se foloseste in izolarea modelului de gips de rasinile composite.

**Continut:** 5ml

### **Instructiuni de utilizare:**

Aplicati acest produs pe modelul de gips, pe marginile coroanelor sau a cavitatilor existente si apoi uscati-l. Aplicati rasina compozita si fotopolimerizati. Daca aveti retentivitati sau imperfectiuni ale modelului, deretentivizati sau astupati cu ceara si apoi aplicati Resin Separator.

### **Masuri de precautie:**

1. Este necesara aerisirea incaperii cand folositi acest produs.
2. Dupa utilizare inchideti bine flaconul. Lasat descoperit, prin volatilizare creste viscozitatea si materialul se poate intari.
3. Dupa aplicarea produsului spalati pensula cu etanol.
4. Datorita neutilizarii, produsul se poate precipita, dar aceasta nu afecteaza cu nimic proprietatile mecanice ale produsului. In acest caz, agitati flaconul puternic de cateva ori pentru omogenizare si apoi il aplicati.
5. Acest produs este inflamabil, nu il lasati si nu il folositi langa foc deschis.
6. In cazul aparitiei unor simptome, cum ar fi: Iritatii ale pielii, opriti folosirea produsului si consultati un medic.
7. Evitati contactul direct cu acest produs. Daca acest produs intra in contact cu pielea, indepartati-l cu alcool si spalati zona cu apa din abundenta. Daca produsul intra in contact cu zona ochilor, clatiti cu apa si cereti ajutor medical.

### **Depozitare:**

Evitati contactul direct cu razele soarelui si depozitati-l la o temperatura de 4-25 grade Celsius.

Distribuitoare : S.C. FANTASTIC GLASS S.R.L, BUCURESTI, STR. TEPES VODA NR.12, SECT2.

[office@tehnicianulmeu.ro](mailto:office@tehnicianulmeu.ro), <tel:0720.439.058>

Producator: YAMAKIN Co. LTD Importator unic: FANTASTIC GLASS SRL